

Інструкція

користування Тачелою

Розділи:

1. Загальні умови експлуатації.
2. Спорядження Тачели для використання.
 - 2.1. Встановлення задніх ручок.
3. Покладення пораненого на Тачелу.
4. Перевезення пораненого на Тачелі.
 - 4.1. Використання стропи.
5. Складання Тачели (ноші в чохол і колеса в сумку)

1. Загальні умови експлуатації.

Система для переміщення поранених на колісній базі Тачела є додатковим засобом, а тому на позиції завжди необхідно мати штатні засоби для переміщення поранених.

ВАЖЛИВО: Перед використання Тачели на позиції обов'язково проведіть тренування її спорядження, покладення пораненого на Тачелу та переміщення пораненого.

Під час спорядження Тачели до використання необхідно вкручувати усі гвинти, не допускати перевантаження системи більше 140 кг. і під час руху не допускати викривлення каркасу.

Для піхотинців на позиції Тачелу необхідно зберігати в спорядженому стані для можливості негайного використання, а для штурмовиків - в жовтій зоні у визначеному місці.

2. Спорядження Тачели для використання.

Перегляньте відео:

- спорядження до використання <https://youtu.be/Wt9Q8bjAM5c>
- встановлення ручок https://youtube.com/shorts/Zw15X5_IYWc

Для спорядження Тачели для використання необхідно витягнути ноші з мішка, колеса з сумки, а розпорну планку від'єднати від кріплення на колесах.



Вставити розпорну планку в трубки на стійках і **зафіксувати гвинтами:**



Розкрити ноші на ширину колісної бази,
не фіксуючи поперечні розпорки:



Вставити стійки колісної бази на ніжки каркасу ношів і
зафіксувати гвинтами:



Натиснути рукою або ногою на кронштейни поперечних розпорок каркасу ношів:



Колісна база встановлена

Зафіксувати гвинти в кронштейні по боках середньої частини ношів і перевернути Тачелу для використання.



2.1. Встановлення задніх ручок

За необхідності застосування задніх ручок необхідно їх витягнути з пазу, в якому їх закріплено і вставити у положення для застосування - довшою частиною «Г» подібної ручки вставити в паз і закріпити гвинтом.

Між задніми ручками за необхідності можна закріпити поперечину, попередньо від'єднавши її від каркасу ношів і закріпивши гвинтами до кожної з ручок:



3. Покладення пораненого на Тачелу.

Перегляньте відео:

- покладення пораненого на Тачелу <https://youtu.be/qjEXWnYOloc>
- встановлення ручок https://youtube.com/shorts/Zw15X5_IYWc

Спосіб покладення пораненого ногами в напрямку передніх ручок є зручним і не вимагає піднімання пораненого за руки і ноги.

Перевезення пораненого ногами вперед також раціональніше, оскільки за статистикою частіше падають ті, хто йдуть попереду, а також враховують і той фактор, що бойовий медик повинен постійно візуально по обличчю оцінювати стан пораненого і не відволікатись на дорогу.

Якщо поранений лежить головою назад він не отримає травму в разі якщо ведучий різко відпустить ручки і Тачела стане передніми ручками на землю.

Для покладення пораненого цим способом можливий наступний алгоритм:

- Підвезти Тачелу до пораненого, щоб ручки Тачели були біля голови чи поясниці пораненого, якщо він сидить.
- Двоє осіб припіднімають пораненого під праву і ліву пахву руки (внутрішню частину плечового згину), якщо це дозволяє стан пораненого, та підтягують на Тачелу, допоки поперек пораненого буде на середній частині Тачели.
- Переконавшись, що голова лежить на матерії, а ноги не виступають по довжині за ручки.
- Зафіксувати пораненого ременями.



Для транспортування необхідно витягнути з пазів «Г» подібні ручки і закріпити їх верхніми гвинтами (біла риска на ручках позначає, що можна вкручувати гвинти).



Коли поперек пораненого точно на середній частині ношів його зручніше і легше транспортувати, оскільки основна вага буде на колісній базі.

ВАЖЛИВО: спосіб покладення пораненого для перевезення може визначатися в залежності від характеру поранення та/або бойовий медик.

4. Перевезення пораненого на Тачелі.

Перегляньте відео:

- перевезення пораненого на Тачелі <https://youtube.com/shorts/mpXRDRmjDyM?feature=share>
- встановлення ручок https://youtube.com/shorts/Zw15X5_IYWc

Тачелу з пораненим можна тягнути за собою або штовхати перед собою.

Для того щоб тягнути або штовхати Тачелу необхідно використовувати «Г» подібні ручки закріплені в пазах, що знаходяться в пазах з переду і ззаду каркасу Тачели.



Тягнути Тачелу за собою може бути легше ніж штовхати перед собою. Для зміни способу перевезення достатньо розвернутися на 180°.

Під час перевезення пораненого доцільно нести автомат на грудях (штатний ремінь проходить над правим плечем, за спиною і під лівою рукою). Таким чином автомат можна швидко привести до бою. Доцільність несення автомата на грудях чи за спиною на ваш розсуд.

Якщо під час перевезення пораненого необхідно здійснити зупинку, необхідно відкрутити спочатку в одній ручці гвинт, опустити вниз ручку і закрутити гвинт, потім так само з другою ручкою. Зверніть увагу, що Тачела буде під невеликим кутом нахилу, а тому стежте, щоб поранений був міцно прив'язаний ремнями.



4.1. Використання стропа

Перегляньте відео:

- використання стропа системи Тачела <https://youtu.be/HH5KNoR8cQo>

Стропа приєднується за карабіни до квадратів з кожної сторони переднього краю ношів біля пазу, в який вставляються передні ручки:



Далі стропа одягається на плечі і фіксується спереду фастексами:



5. Складання Тачели (ноші в чохол і колеса в сумку)

Перегляньте відео:

- складання Тачели <https://youtu.be/k-0Rsf2-JY>

Щоб скласти ноші в чохол необхідно:

- Покласти ноші на поверхню колісною базою догори (перевернути ноші).
- Від'єднати колісну базу: відкрити поперечні розпорні планки, відкрутити гвинти в ніжках і витягнути колісну базу.
- Відкрутити гвинти в середній частині ношів.
- Витягнути тканину з середньої частини ношів в сторону, яку ноші будуть складені, щоб при складанні тканину не пошкодило кронштейном в середині ношів.
- Скласти ноші пополам і покласти в чохол, а колеса в сумку (стійка до стійки колеса).

ВАЖЛИВО: завжди фіксуйте розпорну планку для її зберігання, а також стежте, щоб тканину не пошкодило кронштейном при складанні ношів пополам.

СЛАВА УКРАЇНІ!

ГЕРОЯМ СЛАВА!

БЕРЕЖИ ВАС БОГ!